

LIFESAVER INSTRUKCJA

1.

ZAŁÓŻ JEDNĄ RĘKĄ



lub, w przypadku gdy nie ma możliwości przełożenia gotowej do zaciągnięcia opaski.

PRZEŁÓŻ opaskę przez kończynę,
UMIEŚĆ ją ok. 5-7 cm powyżej
miejsca krwawienia.

2.



ZACIĄGNIJ pasek.

3.



PRZEKRĘĆ krępilec do momentu,
aż ustanie krwawienie.

4.



UMIEŚĆ krępilec w zatrzasku
mocującym aż do momentu
usłyszenia "KLIK".

5.



ZABEZPIECZ luźny koniec paska
owiniętego wokół kończyny rzepem.

6.



ZAPISZ czas aplikacji opaski za
pomocą dołączonego markera
(zanotowanie czasu możliwe
jest w dwóch miejscach).

ZAŁÓŻ PRZY UŻYCIU OBU RĄK



OWIŃ opaskę wokół kończyny,
PRZEŁÓŻ koniec paska przez klamrę,
UMIEŚĆ opaskę ok. 5-7 cm powyżej
miejsca krwawienia.

Ogólne wytyczne

Aby skutecznie zatamować krwawienie, SpyShop LifeSaver Tourniquet powinna być przyłożona bezpośrednio do skóry w odległości ok. 5-7 cm ponad miejscem krwawienia. W przypadku, gdy miejsce nie jest widoczne, należy zaciągnąć na ubraniu, wysoko na kończynie.

Należy jednak pamiętać, aby uniknąć metalowych elementów ubrania, na których zaciskana opaska LifeSaver może spowodować dodatkowe obrażenia.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ważne jest, aby użytkownik pamiętał, iż producent SpyShop Life Saver Tourniquet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i uszkodzenia wynikające z jej stosowania.

Zastosowanie opaski LifeSaver zgodnie z wytycznymi wojskowymi i ratunkowymi pozwala na skuteczne tamowanie krwawień i minimalizowanie ryzyka poważniejszych obrażeń.

